

干化学尿液分析仪保养维护程序

此保养维护程序适用于干化学尿液分析仪（型号：H-50），以下简称分析仪。

1 注意事项

- (1)维护不当可能会损坏分析仪，操作者必须严格按照要求进行操作。
- (2)如果涉及到保养维护程序中没有明确的问题，请联系迪瑞公司客户服务部，由公司指定的专业人员给出维护建议。
- (3)必须按以下流程对分析仪进行维护，如有疑问，请联系迪瑞公司客户服务部。
- (4)样本、质控液、废试纸条等有潜在的生物传染性危险，操作者在实验室中接触相关物品或进行相关维护时，应遵守实验室安全操作规定，并穿戴好个人防护装备（如实验室防护衣，手套等）。

2 日常清洁

2.1 清洁分析仪

使用柔软干布或蘸有温和去污剂的软布擦拭分析仪，保持分析仪清洁。



- 不要在通电状态下清洁分析仪。
- 不要用汽油、油漆稀释剂、苯化合物等可能腐蚀分析仪的有机溶剂擦拭分析仪。

2.2 清洁液晶屏

使用柔软、无磨损的布擦拭液晶屏。



不要用水清洗液晶屏。

2.3 清洁试纸座

- (1)从分析仪中取下试纸座。用清水冲洗后，用浸湿的软布或柔软的吸水纸擦拭干净；
- (2)检查白基准表面是否清洁，如有灰尘、污渍等可用清水冲洗后用柔软的干布擦拭干净；
- (3)清洗后检查定位孔，确保定位孔不被堵塞。



- 不要用任何溶剂清洁白基准，只能用清水清洁。
- 如果白基准有明显划痕、损坏或污染，请与供应商联系。
- 不要用任何会擦伤试纸座和白基准的物质擦拭试纸座。

3 定期清洁

如果试纸座上有积垢，可按以下步骤进行清洁：

- (1)准备少量的 0.1 mol/L 的 NaOH 溶液；
- (2)从分析仪中取出试纸座，用棉签沾 0.1 mol/L 的 NaOH 溶液彻底擦洗；

- (3)用清水冲净试纸座上的 NaOH 溶液；
- (4)用软布擦干试纸座及白基准；
- (5)安装试纸座；
- (6)重新开机自检。



- 切勿使 NaOH 溶液接触到白基准。
- 建议用户每天以此方法对分析仪清洁一次。

4 消毒

由于试纸座与尿样本接触，应对试纸座进行消毒；可选用下列溶液之一进行消毒：

- 2%戊二醛溶液
- 5%次氯酸钠溶液

- (1)在适当的容器中注入10cm高的消毒液；
- (2)将试纸座浸入消毒液中，并确保白基准不接触消毒液；
- (3)浸泡10分钟；
- (4)取出后用清水冲净试纸座上的消毒液；
- (5)用软布擦干试纸座及白基准，安装试纸座；
- (6)重新开机自检。



- 切勿使消毒液接触到白基准。
- 建议用户每周以此方法对分析仪消毒一次。